


ツイニーによる インレー築盛レシピ



Before




After

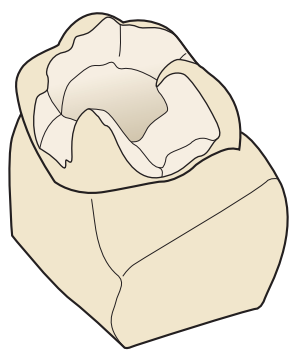

Step 1


窩洞内アンダーカットにリリースを施し、レジンセパレーターを塗布する。

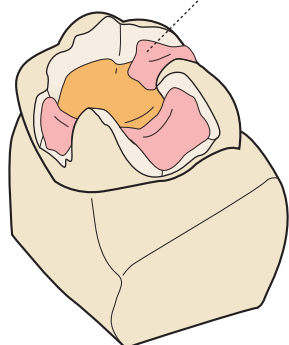

● DA3.5

Step 3

頬側、舌側、隣接側の窩底にDA3.5を築盛する。

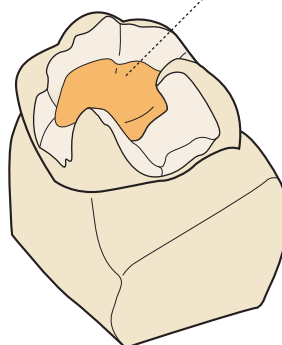


● オパークデンティン
ODA3.5

Step 2


窩底にODA3.5を築盛する。
(十分なレジン厚みが確保されない場合などに使用)

裏面へ ▶

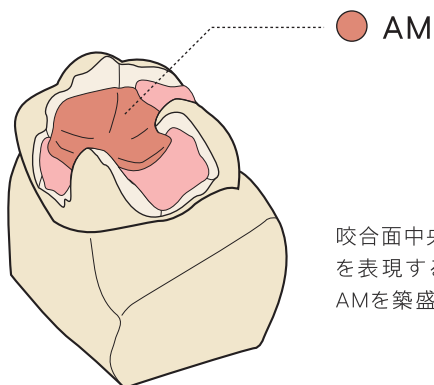


Step 4

咬合面中央部の奥行き(深み)を表現するための下地としてAMを築盛。

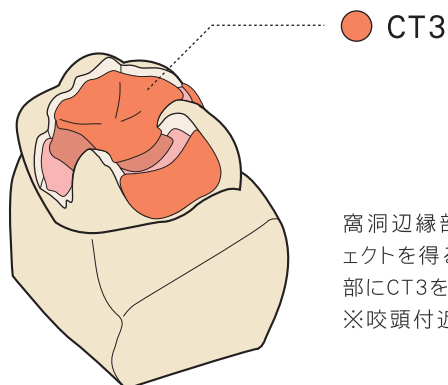


Step 5

窩洞辺縁部からのレンズエフェクトを得るために、窩洞窩壁部にCT3を築盛。
※咬頭付近を目安に築盛。

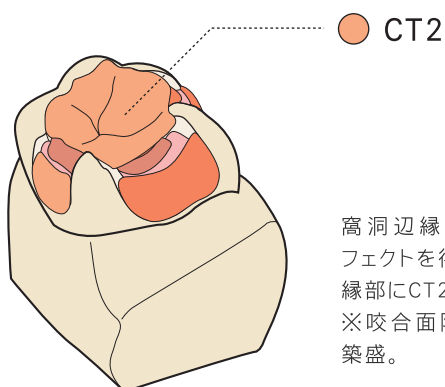

Step 6

窩洞辺縁部からのレンズエフェクトを得るために、窩洞辺縁部にCT2を築盛。
※咬合面隆線付近を目安に築盛。

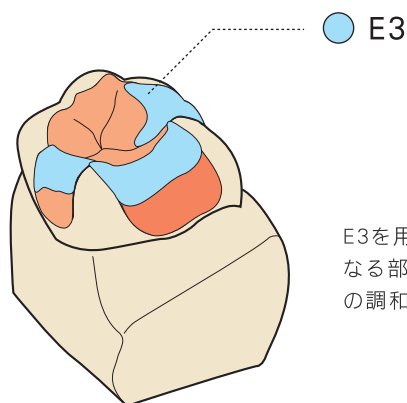

Step 7

E3を用いて臼歯エナメル質となる部分に築盛し、隣在歯との調和を図る。



ツイニーインレー 完成

※ 艶出し研磨は、C&Bダイヤモンド研磨材を使用。

アンレーおよび1級インレーを作製する場合におきましても、形成された窩洞に対してStep 4～Step 7の工程を取り入れていただくことで、より天然歯色調とのマッチングを求めることが可能になります。

※口腔内支台歯へのセットに使用するセメントは、レジンセメント系の製品をお奨めします。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

本社：〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
TEL. (06)6761-4739(代) FAX. (06)6761-4743
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<http://www.yamakin-gold.co.jp>

● 製品に関するお問い合わせはこちら

テクニカルサポート

(9:00～17:00) サンキュー ヨクツク

0120-39-4929

取扱店